

## Wie wird Unifine® SafeControl® angewendet

1. Schutzsiegel entfernen. Nadel auf den Injektionspen schrauben und grüne Kappe entfernen. Injektion gemäß den Anweisungen des Pen-Herstellers durchführen.
2. Nach der Injektion weiße Schutzkappe mit dem Daumen nach vorne schieben, bis ein Klicken zu hören ist und die Schutzkappe die Nadel abdeckt. Sie sehen nun eine orangefarbene Markierung.
3. Nadel vom Injektionspen abschrauben und in einem geeigneten Sicherheitsbehälter für scharfe und spitze Gegenstände entsorgen.

